



INTER MEDICAL FOCSE

INTER MEDICAL FOCSE



SIMPAD SKILLREPORTER Ref : 16096

[Contactez-nous pour un tarif](#)

Cet appareil portable solide est facile à régler et à utiliser. SkillReporter est construit autour du SimPad qui a été développé par Laerdal notamment pour la simulation et la formation RCP. SimPad SkillReporter se connecte avec Resusci Anne QCPR (avec RCP de qualité AED et RCP de qualité D) et Resusci Baby QCPR. Les deux produits peuvent être connectés par câble USB et le Resusci Anne peut aussi être connecté sans fil. Un routeur peut être utilisé pour sécuriser les connexions sans fil quand plusieurs mannequins sont utilisés.

Un retour facile à comprendre et en temps réel

Le logiciel SimPad SkillReporter fournit un retour complet, facile d'utilisation pour formations RCP de qualité. Pendant la formation, l'opérateur pourra surveiller les mesures suivantes jusqu'à 6 mannequins à la fois :

Taux et profondeur de compression

Relâchement correct pour chaque compression

Position correcte des mains

Fréquence et longueur des interruptions

Volume de ventilation approprié

Annotation manuelle et automatique d'événements clés pendant la simulation RCP Si nécessaire, la formation peut être faite en mode Évaluation de sorte qu'aucun retour ne soit donné mais que les données soient enregistrées pour un retour après l'évaluation.

Un retour convivial sur mesure qui souligne les points à améliorer

Le SimPad SkillReporter calcule un score de performance global, et résume les points à améliorer à partir des données obtenues pendant la formation.

Il est possible d'accéder à des données détaillées depuis le résumé de performances afin de pouvoir donner un retour précis dans les domaines à améliorer. Cette flexibilité permet aux formateurs de fournir un retour sur mesure pour chaque étudiant afin qu'il apprenne et améliore sa performance RCP.

Les données et rapports peuvent facilement être transférés sur un PC pour facilement les visualiser, imprimer et sauvegarder avec le logiciel gratuit Session Viewer, disponible dans la section téléchargements. Contrôle total sur la session de formation En plus de toutes les fonctionnalités de retour et d'analyse, SimPad SkillReporter permet aux instructeurs de : Gérer le rythme cardiaque pour une utilisation de défibrillateur en temps réel. Contrôler à distance le AED Trainer 2 et le AED Trainer 3 remotely (via le système Laerdal Link) Ajuster les limites et les seuils de compressions et de ventilations (Préréglages European Resuscitation Council (ERC) / American Heart Association (AHA) Guideline inclus)

579

579